

# Prontosan®

## Haavaloputuslahus ja haavageel



- Trauma- ja põletushaavade esmaabi ning ravi
- Krooniliste haavandite ravi kõigis haava paranemisfaasides

# Prontosan® -

sest ainult puhas haav paraneb

## NÄIDUSTUSED

- Traumahaavad
- Põletushaavad (I-II aste)
- Operatsioonihaavad
- Kroonilised haavandid
- Lamatised

## OMADUSED

- Tõhus kõigis haava paranemise faasides esmaabist kuni haava epiteliseerumiseni
- Puhastab haavad eksudaadist, fibriinist, katust ja koekahjustustest
- Eemaldab mikroobse kolonisatsiooni ja biofilmi
- Vältib haava reinfitseerumist
- Toetab granulatsioonikoe arengut
- Säilitab haavas optimaalse niiskusetaseme
- Vabastab ebameeldivast haavalõhnast
- Manustamine on valututu (hea koetaluvus ka lastel ja tundlikel patsientidel)
- Hüpoallergeenne, mittetoksiline, ei kuivata nahka ja limaskesti
- Sobib korduvaks ja pikaajaliseks kasutamiseks

## KOOSTIS

Prontosan® haavaloputuslahus ja haavageel baseeruvad unikaalsel kahe koostisaine sünergilisel kombinatsioonil. Loputuslahus ja geel sisaldavad pindaktiivset tensiidi undetsüleenamidopropüül-betaini ja antiseptilist komponenti polüheksaniidi. Haavageel on värvitu ja lõhnatu veebaasiline rasvavaba geel, mis lisaks sisaldab glütserooli, süstevett, hüdroksüetüütselluloosi. NB! Geel ei sisalda loomset toorainet. Registreeritud III klassi meditsiiniseadmena.

## KASUTAMINE

- Igasugune haava korrastus algab alati haava ja haavaümbruse ohtra loputamisega.
- Hoolikas loputus on kõigi haavade kiire paranemise võti, sest AINULT PUHAS HAAV PARANEB.
- Loputamine eemaldab haavast ja haavaümbruse nahalt sinna sattunud mustuse, mikroobid ja kahjustatud koed. Kroonilistele haavanditele võib haavakatu paremaks eemaldamiseks pärast loputamist asetada 10-15 minutiks Prontosan® haavaloputuslahusega immutatud mähise või vannitada haavandit Prontosan® haavaloputuslahusega.
- Väiksemad haavad, mis ei vaja verejooksu tõkestamist või kirurgilist töötlust ning haiglaravi mittevajavad I ja II astme põletushaavad lastakse pärast loputamist umbes 1 minuti jooksul kuivada ja kaetakse infitseerumise vältimiseks Prontosan® haavageeliga.
- Haavageel on eriti vajalik sügavatel ja uuristega haavadel, põletushaavadel ning kuivadel vähese eksudaadiga kroonilistel haavanditel ja lamatistel.
- Geeliga kaetud haava võib katta sidemega. Prontosan® sobib kokku nii tavaliste kui kaasageetete nn. interaktiivsete sidematerjalidega, sh. ioonilist hõbedat sisaldavate haavasidemetega (nt. Askina Calgitrol Ag)
- Piisav kogus haavageeli vähendab sideme haavale kleepumise riski. Kui side on siiski haavale kleepunud, niisutatakse seda valutuks eemaldamiseks Prontosan® haavaloputuslahusega.

## TOOTED

Prontosan® loputuslahus 350 ml

Prontosan® loputuslahus 6 x 40 ml

Prontosan® haavageel 30 ml

Informatsioon spetsialistile  
Esindaja: B.Braun Medical OÜ  
Kadaka tee 70B, 12618 Tallinn  
Tel 677 1200

**B BRAUN**  
SHARING EXPERTISE